

NÁVOD K POUŽITÍ

Respirátor FFP3 NR

Pětivrstvý respirátor FFP3 NR s certifikací **EN 149:2001 + A1:2009** je určen k ochraně uživatele proti vdechování **pevných částic a kapalných aerosolů**. Respirátor je určen pro jednorázové použití.

Filtruje nejméně 99 % vzdušných částic a představuje tak nejúčinnější dostupnou ochranu proti koronaviru.

Nesmí být použit k ochraně v prostředích, kde není známo složení a koncentrace škodlivin v ovzduší.

Před použitím prověřte, zda respirátor není poškozený a při nasazování respirátoru na obličej postupujte podle návodu.

Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prашné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele.

Respirátor smí být používán maximálně v rozsahu jedné směny.

Respirátor musí být vyměněn, jestliže:

- prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem
- došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu

Respirátor musí být uchován v suchém a čistém prostředí při teplotách -30 až +40 °C o vlhkosti maximálně 80 %

Návod k nasazení respirátoru:

1. Otevřete respirátor rozevřením nosní výztuhy
2. Předtvarujte nosní výztuhu, přiložte respirátor k obličejí a přetáhněte upínací pásky přes uši
3. Dotvarujte nosní výztuhu
4. Ujistěte se, že respirátor zakrývá především nos a ústa a že přiléhá k obličejí.

Zlepšení těsnosti dosáhnete:

- posunutím respirátoru na obličejí do vhodnější polohy
- úpravou vytvarování nosní výztuhy
- posunutím upínacích pásek do vhodnější polohy

Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy na dosedací ploše těsnící linie respirátoru.

Dovoz a Distribuce v EU: ALFI Corp., s.r.o. Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice, 722 00

Vyrobena v Turecku.

