

NÁVOD NA POUŽITIE

Respirátor FFP2 NR AIR QUEEN

Nanovláknový respirátor AirQUEEN® s vírusovým záchytným >97 % určený pre všetkých, ktorí potrebujú vyššiu stupeň ochrany.

Respirátor je určený na ochranu užívateľa proti vdychovaniu pevných častíc a kvapalných aerosólov.

Nanovláknový respirátor AirQUEEN® s filtračnou účinnosťou nanoštruktúrovanej membrány >97 %.

Respirátor je vyrobený v Kórei a je certifikovaný podľa normy EN 149:2001+A1:2009.

Pred použitím preverte, či respirátor nie je poškodený a pri nasadzovaní respirátora na tvár postupujte podľa návodu. Respirátor je určený na jednorazové použitie

Bezpečnostné upozornenie: Pred použitím skontrolujte, či nie je produkt poškodený. Používajte iba v dostatočne vetraných priestoroch. Zamestnanec musí byť pred použitím pomôcky vyškolený zamestnávateľom o správnom používaní v súlade s platnými bezpečnostnými normami a štandardmi ochrany zdravia.

Nepoužívajte tieto prostriedky v kontaminovanej oblasti za týchto okolností:

1. Množstvo kyslíka v prostredí používania respirátora musí byť minimálne 17 %.
2. Na ochranu proti plynom alebo parám znečisťujúcej látky alebo ich koncentrácie ak sú neznáme alebo bezprostredne nebezpečné pre život alebo zdravie.
3. Koncentrácie znečisťujúcich látok prekračujú maximálne koncentrácie použitia podľa platných OSHA štandardov alebo obmedzení podľa platných vládnych predpisov.
4. Použitie vo výbušnom prostredí.

Nepoužívajte prostriedok s fúzmi na tvári alebo za iných podmienok, ktoré môžu zabrániť dokonalej tesnosti.

Návod na použitie:

1. Otvorte respirátor rozovretím nosnej výstuhu
 2. Predvarujte nosnú výstuhu, priložte respirátor k tvári
 3. Pretiahnite upínacie pásky cez uši
 4. Dotvarujte nosnú výstuhu
 5. Uistite sa, že prostriedok riadne tesní.
- Celý postup návodu na použitie je znázornený na obrázku na obale.



Kontrola tesnosti:

1. Pre vyskúšanie správneho tesnenia prostriedkov, položte obe ruky na prostriedok a ostro vydýchnite.
2. Vyberte prostriedok okamžite v prípade problematického dýchania, alebo pri poškodení či zdeformovaní.
3. Vyberte prostriedok v prípade, že nemôžete dosiahnuť riadne utesnenie.
4. Starostlivé dodržiavanie týchto pokynov je dôležitým krokom pre bezpečné používanie prostriedku.

Nepoužívajte po dobe použiteľnosti alebo pri poškodení obalu. Skladujte maximálne po dobu 5 rokov v teplotách od 10–30 °C a vlhkosti maximálne 50 %.

Všetky dokumenty vrátane Vyhlásenia o zhode nájdete na www.zenco.sk

Výrobca: TOPTEC Co., Ltd.

Distribútor: ZENCO Corp. a.s.

Adresa: Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice 722 00, Česká republika

Vyrobené v Kórei