

# NÁVOD NA POUŽITIE

## Respirátor FFP3 NR

Päťvrstvový respirátor FFP3 NR s certifikáciou **EN 149:2001 + A1:2009** je určený na ochranu užívateľa proti vdychovaniu **pevných častíc a kvapalných aerosólov**. Respirátor je určený na jednorazové použitie.

**Filtruje najmenej 99 % vzdušných častíc a predstavuje tak najúčinnější dostupnú ochranu proti koronavírusu.**

Nesmie byť použitý na ochranu v prostrediach, kde nie je známe zloženie a koncentrácia škodlivín v ovzduší.

**Pred použitím preverte**, či respirátor nie je poškodený a pri nasadzovaní respirátora na tvár postupujte podľa návodu.

**Respirátor je určený** na jednorazové použitie, nečistí sa, doba použitia je závislá na prашnej koncentrácii na pracovisku a aktivite užívateľa.

Respirátor smie byť používaný maximálne v rozsahu jednej smeny.

**Respirátor musí byť vymenený, ak:**

- prach prenikol respirátorom a bolo zistené znečistenie, pach alebo iný príznak prieniku škodlivín respirátorom
- došlo k podstatnému zvýšeniu dýchacieho odporu

Respirátor musí byť uchovaný v suchom a čistom prostredí pri teplotách -30 až +40 °C o vlhkosti maximálne 80 %.

### Návod na nasadenie respirátora:

1. Otvorte respirátor rozovretím nosovej výstuhu.
2. Predtvarujte nosnú výstuhu, priložte respirátor k tvári a pretiahnite upínacie pásiky cez uši.
3. Dotvarujte nosnú výstuhu.
4. Uistite sa, že respirátor zakrýva predovšetkým nos a ústa a že prilieha k tvári.

### Zlepšenie tesnosti dosiahnete:

- posunutím respirátora na tvári do vhodnejšej polohy
- úpravou vytvarovania nosnej výstuhu
- posunutím upínacích pásov do vhodnejšej polohy

Požiadavky na tesnosť pravdepodobne nebudú splnené, ak má užívateľ fúzy na dosadacej ploche tesniacej línie respirátora.

Všetky dokumenty vrátane Vyhlásenia o zhode nájdete na [www.zenco.sk](http://www.zenco.sk)

**Distribútor:** ZENCO Corp. a.s.

**Adresa:** Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice 722 00, Česká republika

Vyrobené v Turecku.

