

# NÁVOD NA POUŽITIE

## Respirátor Spurtex SPUR Nano FFP2

Nanovláknový respirátor SPURTEX® s vírusovým záchyтом 98,5% určený pre všetkých, ktorí potrebujú vyšší stupeň ochrany.

**Respirátor Spurtex je určený na ochranu užívateľa proti vdychovaniu pevných častíc a kvapalných aerosólov. Nanovláknový respirátor SPURTEX® s filtračnou účinnosťou nanoštruktúrovanej membrány 98,5 %. Respirátor je vyrobený v Českej republike a je certifikovaný podľa normy EN 149:2001+A1:2009.**

**Pred použitím preverte**, či respirátor nie je poškodený a pri nasadzovaní respirátora na tvár postupujte podľa návodu. Respirátor je určený na jednorazové použitie.

**Bezpečnostné upozornenie:** Pred použitím skontrolujte, či nie je produkt poškodený. Používajte iba v dostatočne vetraných priestoroch. Zamestnanec musí byť pred použitím pomôcky vyškolенý zamestnávateľom o správnom používaní v súlade s platnými bezpečnostnými normami a štandardmi ochrany zdravia.

**Nepoužívajte tieto prostriedky v kontaminovanej oblasti za týchto okolností:**

1. Množstvo kyslíka v prostredí používania respirátora musí byť minimálne 17 %.
2. Na ochranu proti plynom alebo parám znečisťujú látky alebo ich koncentrácie ak sú neznáme alebo bezprostredne nebezpečné pre život alebo zdravie.
3. Koncentrácie znečisťujúcich látok prekračujú maximálne koncentrácie použitia podľa platných OSHA štandardov alebo obmedzení podľa platných vládnych predpisov.
4. Použitie vo výbušnom prostredí.

Nepoužívajte prostriedok s fúzi na tvári alebo za iných podmienok, ktoré môžu zabrániť dokonalej tesnosti.

### Návod na použitie:

1. Otvorte respirátor rozvretím nosnej výstuhu 2. Predtvarujte nosnú výstuhu, priložte respirátor k tvári
3. Pretiahnite upínacie pásky cez uši 4. Dotvarujte nosnú výstuhu 5. Uistite sa, že prostriedok riadne tesní. Celý postup návodu na použitie je znázornený na obrázku na obale.



### Kontrola tesnosti:

1. Pre vyskúšanie správneho tesnenia prostriedkov, položte obe ruky na prostriedok a ostro vydýchnite.
2. Vyberte prostriedok okamžite v prípade problematického dýchania, alebo pri poškodení či zdeformovaní.
3. Vyberte prostriedok v prípade, že nemôžete dosiahnuť riadne utesnenie.
4. Starostlivé dodržiavanie týchto pokynov je dôležitým krokom pre bezpečné používanie prostriedku.

Nepoužívajte po dobe použiteľnosti alebo pri poškodení obalu. Skladujte maximálne po dobu 5 rokov v teplotách od 10–30 °C a vlhkosti maximálne 50 %.

Všetky dokumenty vrátane Vyhlásenia o zhode nájdete na [www.zenco.sk](http://www.zenco.sk)

**Výrobca:** SPUR a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky 763 02 Zlín

**Distribútor:** ZENCO Corp. a.s.

Adresa: Provozní 5492/3, Ostrava-Třebovice 722 00, Česká republika

Vyrobенé v Českej republike